

Hansaplast® WUNDSPRAY

Zur antiseptischen Reinigung von akuten Wunden, wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleineren Brandwunden 1. und 2. Grades sowie offenen Blasen. Kann auch bei chronischen und postoperativen Wunden nach Arztanweisung eingesetzt werden. Auch geeignet für Kinder und empfindliche Haut.

- Reinigt Wunden schnell und schmerzfrei
- Schützt vor Wundinfektionen
- Besonders hautfreundliches, farbloses Spray

Die drei Schritte der Wundversorgung:

1. Eine saubere und gereinigte Wunde ist der erste Schritt für eine optimale Heilung. Reinigen Sie Ihre Wunde mit dem Hansaplast Wundspray schmerzfrei und schnell, um die Wunde effektiv vor Wundinfektionen zu schützen.
2. Der zweite Schritt ist der Schutz der Wunde vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Bakterien, um eine ungestörte Heilung zu ermöglichen. Schützen Sie Ihre Wunde mit einem Pflaster oder sterilen Wundverband von Hansaplast.
3. In einem dritten Schritt können Sie Ihrer Wunde helfen, sicher, schnell und mit einem geringeren Narbenrisiko zu heilen. Tragen Sie dafür die Hansaplast Wundheilsalbe regelmäßig bis zur vollständigen Heilung auf.

Anwendung:

Blutung stoppen. Aus einer Entfernung von ca. 10cm auf die gesamte Wunde sprühen, um Schmutz und sichtbare Partikel zu entfernen. Wenn notwendig, wiederholen. Die Wunde und die umliegende Haut vorsichtig trocknen. Verklebte oder verkrustete Verbände können mit dem Wundspray befeuchtet werden, um sie einfach zu entfernen.

Warnhinweise:

- Bei größeren Wunden mit viel Exsudat oder Zeichen einer Infektion sollte ein Arzt kontaktiert werden.
- Im Zweifel sollte bei Brandwunden ein Arzt aufgesucht werden, um den Schweregrad der Brandwunde festzustellen.
- Nur zur äußeren Anwendung.
- Bei Rötung, Schwellung oder Schmerz im Wundbereich, wenn sich der Zustand verschlechtert oder wenn der Wundheilungsprozess nicht innerhalb weniger Tage einsetzt, sollt ein Arzt aufgesucht werden.
- Bei Schwangeren oder stillenden Müttern sowie bei Kindern unter 2 Jahren sollte vor der Anwendung ein Arzt aufgesucht werden.

Nicht anwenden:

- In Verbindung mit anderen lokal anzuwendenden Präparaten, wie z.B. Cremes, im gleichen Hautbereich.
- In Verbindung mit anionischen Tensiden, Seifen, Ölen, Gelen etc.
- Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Im Mittel- oder Innenohr und im Bereich der Augen.
- Dauerhaft für mehr als 30 Tage.
- Nicht schlucken.

Nebenwirkungen:

Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie bitte Ihren Apotheker oder den Hersteller.

Zusammensetzung:

0,1% Decylglucoside Tensid und 0,04 % Polihexanid (PHMB) in Ringerlösung.

Packungsgrößen:

Sprays in 50ml, 100ml. Möglicherweise sind nicht alle Verpackungsgrößen in allen Ländern zum Verkauf registriert.

Lagerhinweise:

Bewahren Sie die Anwendungshinweise solange auf, wie Sie das Produkt verwenden. Nur unbeschädigte Sprays verwenden. Das Ablaufdatum und die Chargennummer sind auf dem Boden des Sprays aufgedruckt. Nur bis zum Ablaufdatum nutzen, nach Anbruch 6 Monate haltbar. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Medizinprodukt

Letzte Überarbeitung der Anwendungshinweise 09.2017